

バッテリーパック交換手順書

(AED本体バッテリー)

対象機種

ダイナハートAED シリーズ

対象バッテリー

バッテリーパック (BTB-005S)


必要なもの

①AED本体

②新しいバッテリー




1 新しいバッテリーの準備

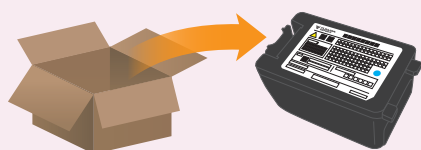

本体へ装着する分の新しいバッテリーを箱から取り出します。

2 古いバッテリーの取り出し

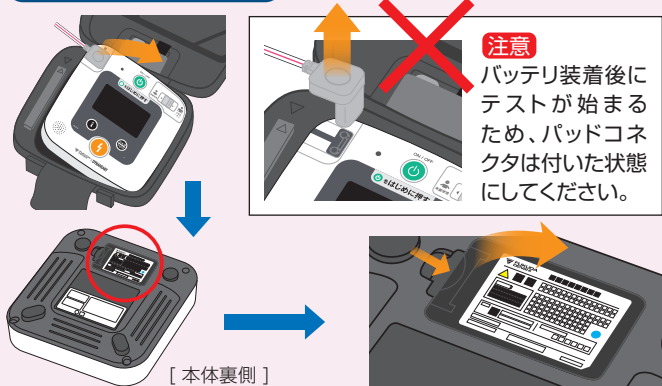

AED本体を裏返して、装着されているバッテリーを外します。



バッテリーを外す際は、ツメを押しながら持ち上げます。

3 新しいバッテリーの装着

古いバッテリーを取り外してから新しいバッテリーを装着してください。交換後にバッテリー装着テストを行うため、「電源を入れずに」バッテリー交換をしてください。



新しいバッテリーを装着します。

カチッ

①②の順に装着します。

4 バッテリー装着テスト

バッテリーを装着すると自動でガイダンスが始まります。AEDの音声に従って操作し、バッテリー装着テストを完了してください。※音声ガイダンスの指示に従って操作してください。


①バッテリーを装着すると音声ガイダンスが始まります。



②切替スイッチを未就学児モードにしてから、小学生～大人モードに戻します。



③電源ボタンを押します。

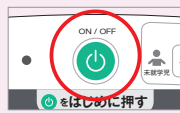

④インフォボタン(iマーク)を押します。その後、言語ボタン(日本語/English)を押します。最後にショックボタン(⚡マーク)を押します。



⑤テスト完了。異常がある場合は、該当箇所のお知らせがあります。テスト完了報告の後は自動で電源OFFになります。



正常: インジケータが緑色で点滅している。
異常: インジケータが赤点灯+アラーム音。もしくは消灯している。

異常が発生した場合はAEDガーディアンSにて内容を確認することもできます。

5 消耗品期限管理タグの更新



書き換えシールにバッテリーを交換した日付を記入してください。

記入後は期限管理タグに重ねて貼ってください。

6 期限管理

消耗品期限管理タグの更新後はカードケースに入れて、キャリングケースに付けて保管してください。



ログインはこちら



●バッテリーの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(各自治体の電池処分方法に準じて廃棄してください)

●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。
https://www.fukuda.co.jp/aed/management/cheku_S1.html



AEDガーディアンSも合わせて更新してください。ログインは右記QRコードよりできます。