

AED電極パッド交換手順書

対象機種

ダイナハートAED シリーズ

対象パッド


ダイナハートAED電極パッド (TEB-900D)

必要なもの

①AED本体




②新しいパッド

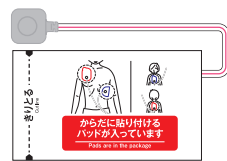

1 新しいパッドの準備


本体へ装着する分の新しいパッドを袋から取り出します。

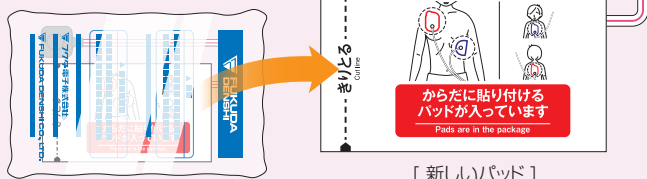



〔新しいパッド〕

2 パッドの交換

キャリングケースを開けてAEDに接続されているパッドコネクタを外し、古いパッドを取り出します。

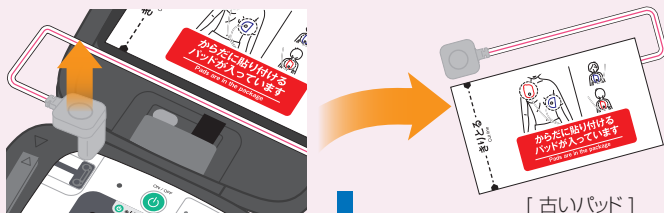

新しいパッドのコネクタを本体に差し込み、黒バンドで固定しながら収納します。ケーブルはプレートの下に入れて、フタに這わせるように収納してください。

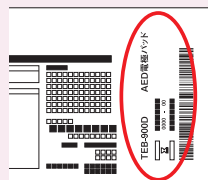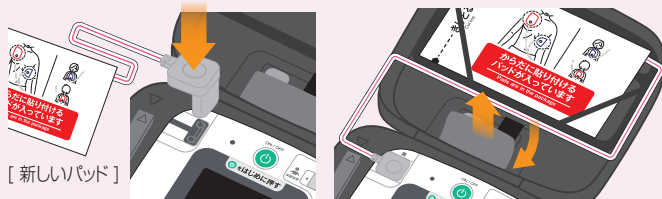

パッドの期限は、図のようにパッドの袋に記載されています。記載されている期限を期限管理タグに記入してください。

●パッドの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(以下は一般例)

【一般企業・公共機関所有の場合】産業廃棄物として廃棄してください。

【個人所有の場合】一般廃棄物(不燃物)として廃棄してください。

※各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。


3 予備パッドの交換

〔予備パッドをご購入のお客様〕

キャリングケースのフタの裏側に収納されている古い予備パッドを取り出してください。



新しい予備パッドを収納してください。

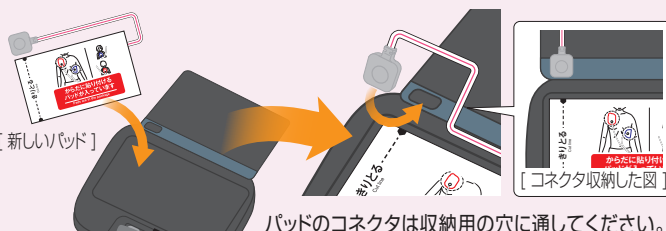

パッドのコネクタは収納用の穴に通してください。

4 消耗品期限管理タグの更新

ダイナハートAED 期限管理タグ用 書き換えシール	
年 月	年 月
年 月	年 月
年 月	年 月
年 月	年 月

書き換えシールに新しいパッドの期限を記入してください。

AED 期限管理		フクダデンシ	
パッド期限	予備パッド期限	年 月	年 月
年 月	年 月	年 月	年 月
年 月	年 月	年 月	年 月
AED 設置日	交換目安: 4年	交換目安: 5年	交換目安: 8年

記入後は期限管理タグに重ねて貼ってください。

5 期限管理

消耗品期限管理タグの更新後はカードケースに入れて、キャリングケースに付けて保管してください。



AEDガーディアンSも合わせて更新してください。ログインは右記QRコードよりできます。

ログインはこちら



●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

https://www.fukuda.co.jp/aed/management/cheku_S1.html

