

AEDバッテリー交換手順書

対象機種

ベネハートCシリーズ

対象バッテリー

AEDベネハート用バッテリー (LM34S002A)

必要なもの

① AED本体



② 新しいバッテリー



① 新しいバッテリーの準備



本体へ装着する分の新しいバッテリーを箱から取り出します。

② 古いバッテリーの取り外し




AED本体を裏向きにして置きます。

図のように、AED上部のバッテリーホルダのフタを上へスライドさせて取り外します。

バッテリーを左にスライドさせて持ち上げ、バッテリーホルダから取り外します。

③ 新しいバッテリーの装着

古いバッテリーを取り外してから3分後に装着してください。

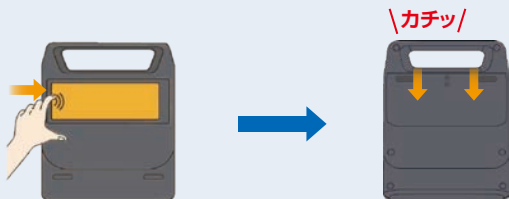

ピンの位置を合わせて所定の位置に収まるまで、バッテリーを右にスライドさせます。

バッテリーホルダのフタをかぶせて、カチッという音がするまで、下にスライドさせて再度取り付けます。

●バッテリーの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(各自治体の電池処分方法に準じて廃棄してください)




●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。
弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。
https://www.fukuda.co.jp/aed/assets/pdf/management/tk_bh.pdf



④ バッテリー装着後のユーザーテスト


バッテリーを装着すると自動でガイダンスが始まります。AEDの音声に従って操作し、ユーザーテストを完了してください。
※ガイダンスが途中で停止した場合は、以下の方法でユーザーテストを実施します。
言語切替ボタンを5秒間長押ししたまま、モード切替スイッチを未就学児モードにして再び小学生～大人モードに戻します。ここからはAEDのガイダンスに従ってください。

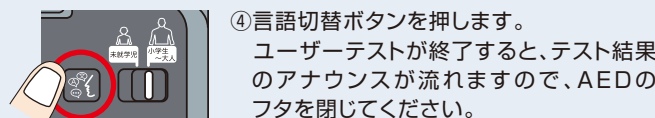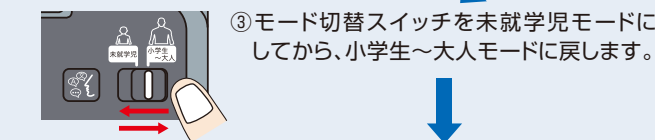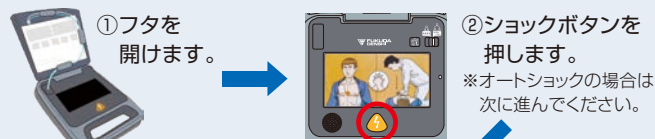

インジケータが緑色に点滅すれば完了となります。(点灯している場合はしばらくお待ちください。)

赤点滅もしくは消灯している場合はお買い上げいただいた販売店もしくはAEDコールセンターまでお問い合わせください。

⑤ 消耗品期限管理タグの更新

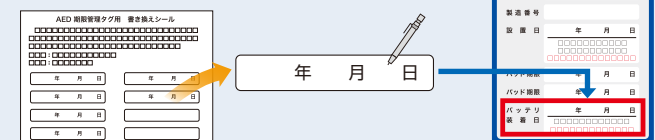

書き換えシールにバッテリーを交換した日付を記入してください。

記入後は期限管理タグに重ねて貼ってください。

⑥ 収納BOXに設置

