


AEDバッテリー取り付け・交換手順書

対象機種 ハートスタートFRxシリーズ


対象バッテリー ロングライフバッテリー(M5070A)

必要なもの ①AED本体

②新しいバッテリー

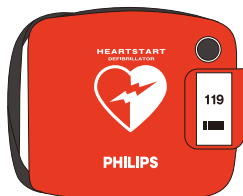

キャリングケース

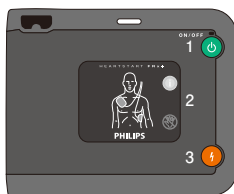


本体





ロングライフバッテリー

① 新しいバッテリーの準備

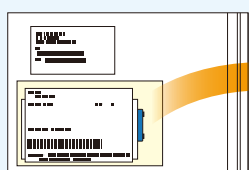

本体へ装着する分の新しいバッテリーを袋から取り出します。

② 古いバッテリーの取り出し

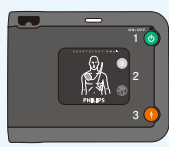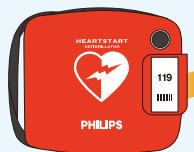


キャリングケースから本体を取り出します。

[本体裏側]



取り外し前

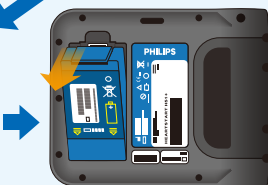


手前に引きます




取り外し後

機器裏面にバッテリーが装着されています。バッテリー上部の爪の部分を手前に引っ張って取り外してください。

③ 新しいバッテリーの挿入

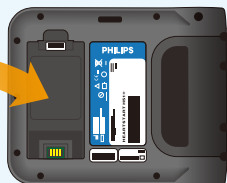


新品バッテリーを装着してください。

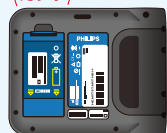

装着完了

バッテリーを取り外して5秒経過してから、新品バッテリーを装着してください。バッテリー装着時は、カチッと音がするまで押し込んでください。

④ バッテリー装着後のセルフテスト

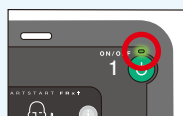


バッテリーを装填すると、自動的にセルフテストを開始します。セルフテストが開始すると、緑のランプが点滅します。

※緊急の場合ではない限り、電源ボタンは押さないでください。



オレンジのショックボタンを押す。

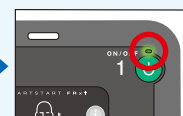

最後にもう一度電源ボタンを押します。セルフテストが終了すると、AEDからテスト結果の音声レポートが流れます。その後、緑のランプが点滅すれば完了となります。

⑤ 消耗品期限管理タグの更新



バッテリーの梱包袋から交換用シールを取り出してください。

次回交換 年 月

AED 消耗品交換時期

項目	内容
品名	PHILIPS M5070A
規格	PHILIPS M5070A
納入	年月日
交換	年月日
小使	年月日
大使	年月日

次回交換 2020年 8月

装着日より4年後を次回交換日として記入してください。次回交換日記入後は、既に貼ってあるシールと張り替えてください。

⑥ 収納BOXに設置



消耗品期限管理タグが収納BOXの外から見えるように設置してください。

●バッテリーの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(各自治体の電池処分方法に準じて廃棄してください)

●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

https://www.fukuda.co.jp/aed/daily_check/daily_check.html