

AEDパッド交換手順書

対象機種

ベネハートCシリーズ

対象パッド


AEDベネハート用パッド 共通 (MR60)

必要なもの

①AED本体




②新しいパッド

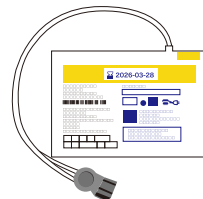

① 新しいパッドの準備


本体へ装着する分の新しいパッドを袋から取り出します。

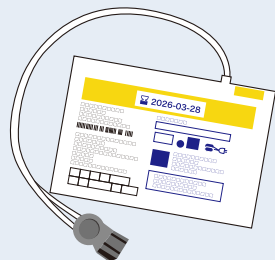



〔本体装着分〕

② パッドの交換

本体のフタを開けてコネクタを外し、古いパッドを取り外します。

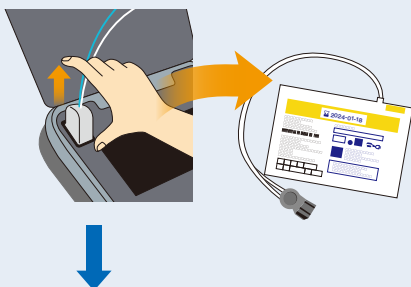

新しいパッドのコネクタを本体に差し込み、フタの裏側に収納します。パッドの線をフタに這わせるように収納してください。

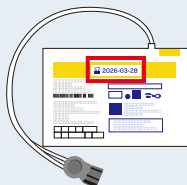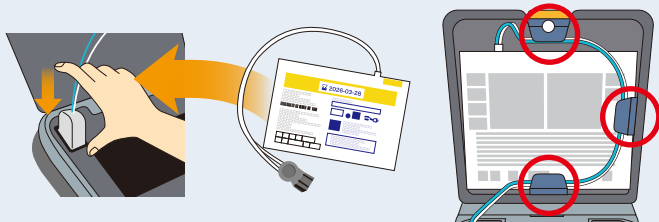

パッドの期限は、図のようにパッド上部に記載されています。本体のウィンドウから期限が見えるように収納してください。

●パッドの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(以下は一般例)

〔一般企業・公共機関所有の場合〕産業廃棄物として廃棄してください。

〔個人所有の場合〕一般廃棄物(不燃物)として廃棄してください。

※各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

③ 予備パッドの交換

〔予備パッドをご購入のお客様〕

キャリングバッグ内側のポケットに収納されている古い予備パッドを取り出してください。



キャリングバッグ内側にパッド収納スペースがあります。



図のように収納されていますので、パッドを取り出してください。

新しい予備パッドをキャリングバッグ内側のポケットに収納してください。




キャリングバッグ内側にパッド収納スペースがあります。



図のようにポケットに収納してください。

④ 消耗品期限管理タグの更新

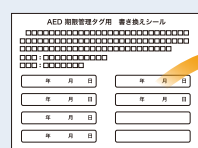

書き換えシールに新しいパッドの期限を記入してください。




記入後は期限管理タグに重ねて貼ってください。

⑤ 収納BOXに設置



消耗品期限管理タグが収納BOXの外から見えるように設置してください。

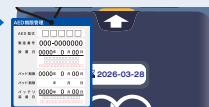

●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

https://www.fukuda.co.jp/aed/assets/pdf/management/tk_bh.pdf

