

AEDパッド取り付け・交換手順書

対象機種 ハートスタートFR3(861388/861389/861388#Pro/861389#Pro)

対象パッド SMARTパッドⅢ(989803149981)

必要なもの ①AED本体


②新しいパッド




キャリングケース



本体

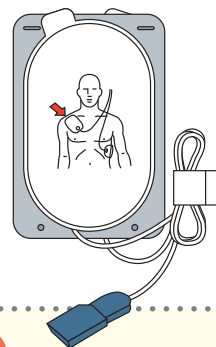


① 新しいパッドの準備

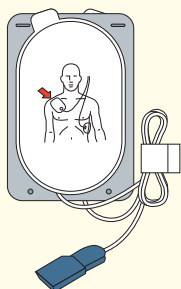


本体装着分

本体へ装着する分の新しいパッドを袋から取り出します。(予備パッドは袋から取り出さないでください)

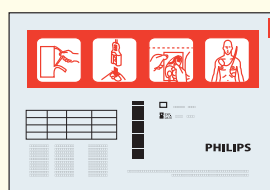

予備分

④ 消耗品期限管理タグの更新

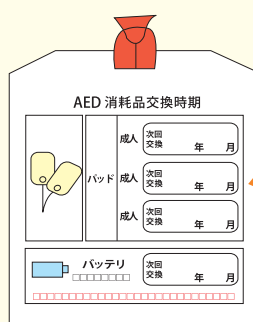

新しいパッドに記載されている期限を記入してください。




② 古いパッドの取り出し



キャリングケース蓋側部分に収納されている古い予備パッドを取り出し、本体に装着されているパッドも取りはずしてください。

⑤ 収納BOXに設置

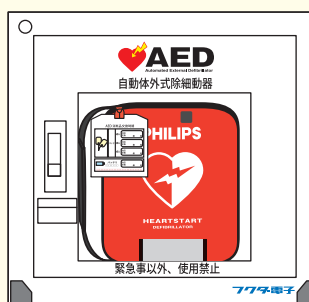

消耗品期限管理タグが収納BOXの外から見えるように設置してください。

③ 新しいパッドの収納



新しい予備パッドをキャリングケース蓋側部分に収納し、AED本体にパッドコネクタをしっかりと差し込んで、パッドが台紙からはがれないようにパッドスロットに収納してください。

●パッドの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(以下は一般例)

一般企業・公共機関所有の場合 産業廃棄物として廃棄してください。

個人所有の場合 一般廃棄物(不燃物)として廃棄してください。

※各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

http://www.fukuda.co.jp/aed/daily_check/daily_check.html