


# AEDパッド取り付け・交換手順書

対象機種 ハートスタートFRxシリーズ


対象パッド SMARTパッドII(989803139261)

必要なもの ①AED本体


②新しいパッド

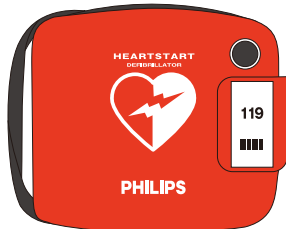


キャリングケース

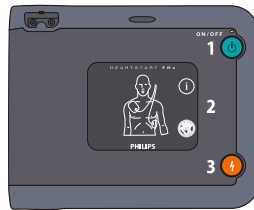

本体

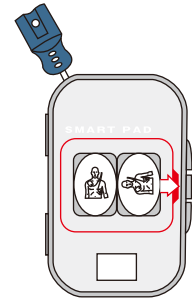


## ① 新しいパッドの準備

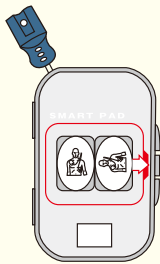


本体装着分

本体へ装着する分の新しいパッドを袋から取り出します。(予備パッドは袋から取り出さないでください)

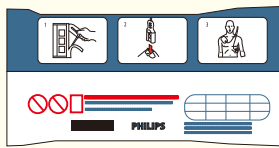

予備分


## ④ 消耗品期限管理タグの更新

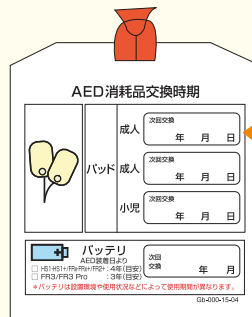

新しいパッドに記載されている期限を記入してください。




## ② 古いパッドの取り出し

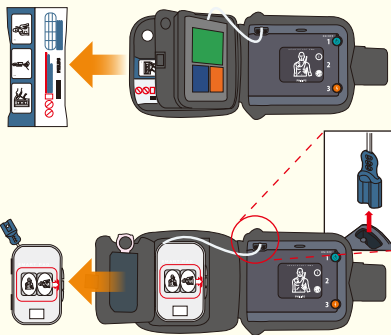


キャリングケース蓋側部分に収納されている古い予備パッドを取り出し、本体に装着されているパッドも取りはずしてください。

## ⑤ 収納BOXに設置

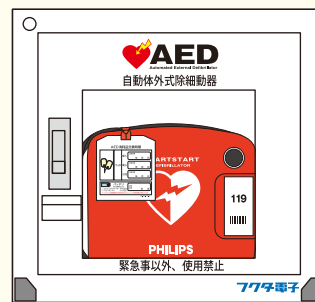

消耗品期限管理タグが収納BOXの外から見えるように設置してください。

## ③ 新しいパッドの収納

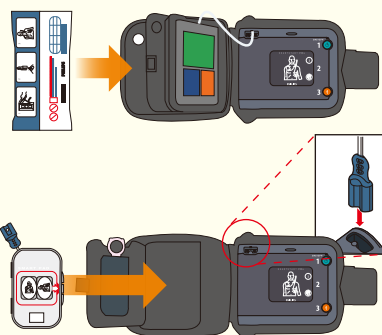

新しい予備パッドをキャリングケース蓋側部分に収納します。次にAED本体にパッドコネクタをしっかりと差し込んで収納します。

## ●パッドの廃棄について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って廃棄してください。(以下は一般例)

一般企業・公共機関所有の場合 産業廃棄物として廃棄してください。

個人所有の場合 一般廃棄物(不燃物)として廃棄してください。

※各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

## ●日常点検

毎日のインジケータの確認をお願い致します。

弊社HPにございます日常点検表をご利用ください。

[https://www.fukuda.co.jp/aed/daily\\_check/daily\\_check.html](https://www.fukuda.co.jp/aed/daily_check/daily_check.html)